



DELTA MEDICAL

# RSW THERAPY RADIAL SHOCK WAVES

LA SOLUZIONE IDEALE  
PER IL  
RIMODELLAMENTO  
CORPOREO



# **ONDE ACUSTICHE IN ESTETICA**

**COSA SONO LE ONDE ACUSTICHE RADIALI ?  
APPLICAZIONE IN ESTETICA AVANZATA  
INFORMAZIONI, EFFETTI BIOLOGICI E CONTROINDICAZIONI**

## **LE ONDE ACUSTICHE RADIALI RSW**

**SONO IMPULSI SONORI (ENERGIA ACUSTICA) DI NATURA MECCANICA IN GRADO DI PROPAGARSI NEI TESSUTI, IN SEQUENZA RAPIDA E RIPETUTA IRRADIANDOSI SULLA ZONA TRATTATA.**


**LA LORO AZIONE STIMOLA UNA RISPOSTA FISIOLOGICA CHE ACCELERA I NATURALI PROCESSI DI RIPARAZIONE DEI TESSUTI. LE ONDE ACUSTICHE, GENERATE DAL MANIPOLO AGISCONO FAVORENDO L'IRRORAZIONE SANGUIGNA, MIGLIORANO LA PERMEABILITÀ DELLE MEMBRANE CELLULARI E LO SCAMBIO DI SOSTANZE TRA LE CELLULE E L'AMBIENTE CIRCOSTANTE ELIMINANDO LE SCORIE.**

**PERMETTONO LA RIDUZIONE DELLE CELLULE ADIPOSE E IL RICOMPATTAMENTO DEL TESSUTO CONNETTIVO. QUESTA METODICA RIATTIVA IL METABOLISMO INCORAGGIANDO LA LIPASI E AGENDO DIRETTAMENTE SU CELLULITE E ADIPOSITÀ LOCALIZZATE.**

**INOLTRE INCREMENTA LA MICROCIRCOLAZIONE VENO-LINFATICA, STIMOLA I FATTORI DI CRESCITA, AUMENTA LA PRODUZIONE DI COLLAGENE ED ELASTINA MIGLIORANDO IL TONO DELLA PELLE IN TERMINI DI ELASTICITÀ E COMPATTEZZA.**

**LE ONDE ACUSTICHE AWT® NON SONO INVASIVE, AGISCONO IN MANIERA NATURALE, PERMETTENDO DI LAVORARE IN TOTALE SICUREZZA SULLA CAUSA DELL'INESTETISMO E RIPRISTINARE LE CONDIZIONI OTTIMALI NELLE ZONE CHE SONO STATE "COLPITE" DALL'INESTETISMO STESSO, CON EFFETTI VISIBILI GIÀ DALLA PRIMA SEDUTA E CHE MIGLIORANO NELLE ORE E NEI GIORNI SUCCESSIVI.**

# ECCO COME FUNZIONANO SU CELLULITE

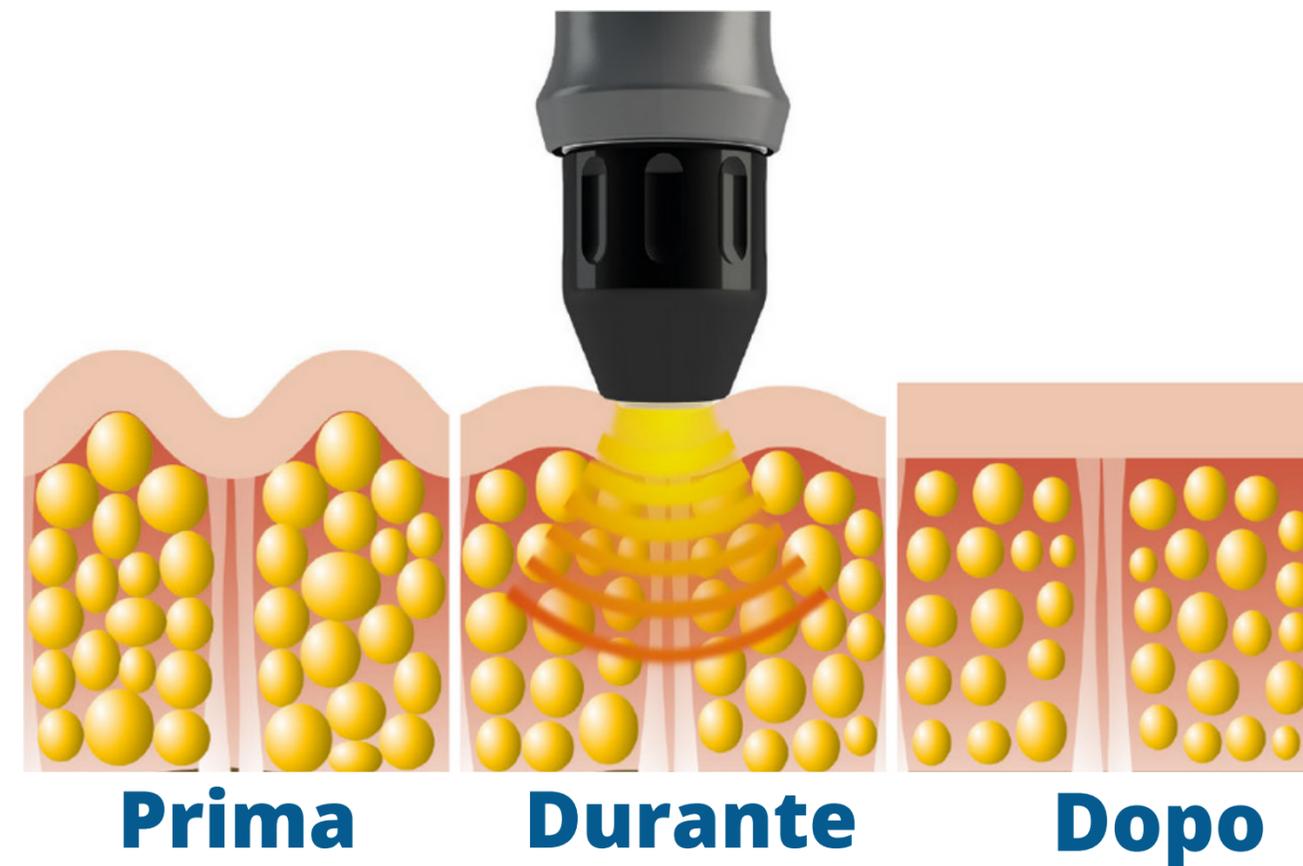

- AGISCONO DIRETTAMENTE SULL' INESTETISMO.
- AGISCONO DIRETTAMENTE SU TUTTI I LIVELLI DEI TESSUTI: PELLE, TESSUTO CONNETTIVO, TESSUTO ADIPOSO, TESSUTO MUSCOLARE.
- UTILIZZANO I NATURALI MECCANISMI DI RIPARAZIONE DEL CORPO UMANO.
- SCIOLGONO GLI ACCUMULI DELLE CELLULE ADIPOSE.
- STIMOLANO LA CIRCOLAZIONE VENO-LINFATICA, FAVORISCONO L'OSSIGENAZIONE, LA VASO DILATAZIONE E LA RIDUZIONE DELLO STRESS OSSIDATIVO.
- ACCELERANO IL METABOLISMO LIPIDICO, REGOLANDO L'OROLOGIO BIOLOGICO DELLA CELLULA ADIPOSA E ATTIVANDO LA LIPASI.
- INDUCONO UNA PERMEABILITÀ TEMPORANEA DELLA MEMBRANA CELLULARE.
- AGISCONO MODIFICANDO LA STRUTTURA DELLA CELLULA ADIPOSA NELLA FORMA E NEL VOLUME REGOLANDO IL SUO METABOLISMO E RIPRISTINANDO IL SUO ASPETTO ORIGINALE.
- STIMOLANO I FATTORI DI CRESCITA E INCREMENTANO IL TURNOVER CELLULARE.
- AUMENTANO LA PRODUZIONE DI COLLAGENE ED ELASTINA.




# BENEFICI SUL CORPO

## SUL CORPO

- TUTTI GLI INESTETISMI LEGATI ALLA CELLULITE
- TUTTE LE IRREGOLARITÀ CUTANEE DOVUTE ALLA PRESENZA DI GRASSO IN ECCESSO.

## E SI PUÒ:

- OTTENERE UN'AZIONE LEVIGANTE E RICOMPATTANTE
  - RIMODELLARE IL CORPO
- RASSODARE E TONIFICARE IL TESSUTO CUTANEO E CONNETTIVO
- FAVORIRE IL DRENAGGIO LINFATICO ELIMINANDO I LIQUIDI IN ECCESSO
- AGIRE POTENZIANDO IL TONO DEL TESSUTO CONNETTIVO E MUSCOLARE PER ARMONIZZARE ED ESALTARE LA BELLEZZA DEL CORPO

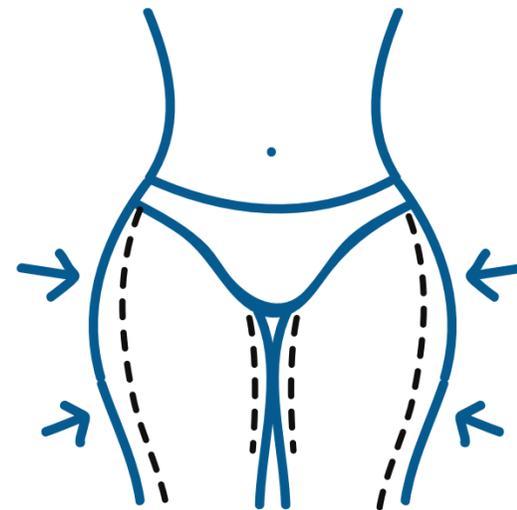


LA CELLULITE DI TIPO I-III.  
SMAGLIATURE.

ADIPE E RIMODELLAMENTO CORPOREO.  
RASSODAMENTO DEI TESSUTI E TONO  
MUSCOLARE.



# **BENEFICI SUL VISO**

**EFFETTI BIOLOGICI DELLE ONDE RSW SUL VISO**  
**RIATTIVAZIONE DEI FIBROBLASTI PER LA SINTESI DI COLLAGENE ED ELASTINA.**  
**STIMOLAZIONE DEL RINNOVAMENTO CELLULARE.**  
**MIGLIORAMENTO DELLA DENSITÀ E DELL'ELASTICITÀ CUTANEA.**

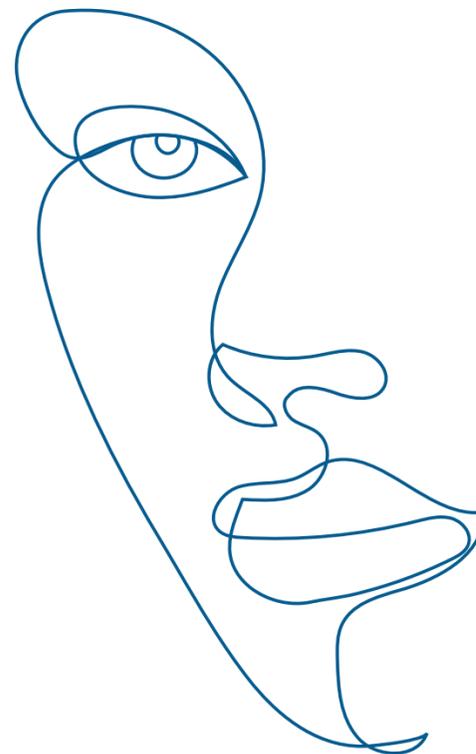

**SI POSSONO TRATTARE:**

- RUGHE**
- CICATRICI**
- BORSE E OCCHIAIE**
- CEDIMENTO CUTANEO**

**E PERTANTO OTTENERE:**

- RASSODAMENTO**
- MODELLAMENTO DELL'OVALE**
- EFFETTO TENSORE (LIFTING)**
- TONIFICAZIONE**

**• MIGLIORAMENTO DELLA TEXTURE E DELLA QUALITÀ DELLA PELLE**



# **CONTROINDICAZIONI SUL TRATTAMENTO**



**DISTURBI DELLA COAGULAZIONE (EMOFILIA).  
TROMBOSI.  
MALATTIE TUMORALI - PAZIENTI CON CARCINOMA.  
GRAVIDANZA.**

**BAMBINI NELL'ETÀ DELLO SVILUPPO (CARTILAGINI DI ACCRESCIMENTO).  
TERAPIA CORTISONICA FINO A 6 SETTIMANE PRIMA DEL PRIMO TRATTAMENTO**

**EFFETTI COLLATERALI SUL TRATTAMENTO DELLE ONDE ACUSTICHE RSW  
A SEGUITO DEL TRATTAMENTO CON RSW POTREBBERO MANIFESTARSI I SEGUENTI EFFETTI COLLATERALI  
CHE SONO COMUNQUE PASSEGGIERI E DI BREVE DURATA:**

**GONFIORE.  
ARROSSAMENTO.  
EMATOMI**

**· LESIONI CUTANEE IN CASO DI PRECEDENTE TERAPIA CORTISONICA.**





DELTA MEDICAL

**GRAZIE PER L'ATTENZIONE**



**[www.deltamedical.it](http://www.deltamedical.it)**



**[info@deltamedical.it](mailto:info@deltamedical.it)**

